



HyalDew

5^a Generación de implantes dérmicos
de ácido hialurónico (HA)

CE2195

TCTmedical
SMART BEAUTY TECHNOLOGY


¿Es posible un ácido hialurónico más duradero?

Sí, gracias a la nueva tecnología patentada MCL
Multi Staged Crosslinking

HyalDew


es un relleno dérmico que proporciona:

1. Mayor duración.
2. Mayor viscoelasticidad
3. Mayor volumen.
4. Mayor seguridad.

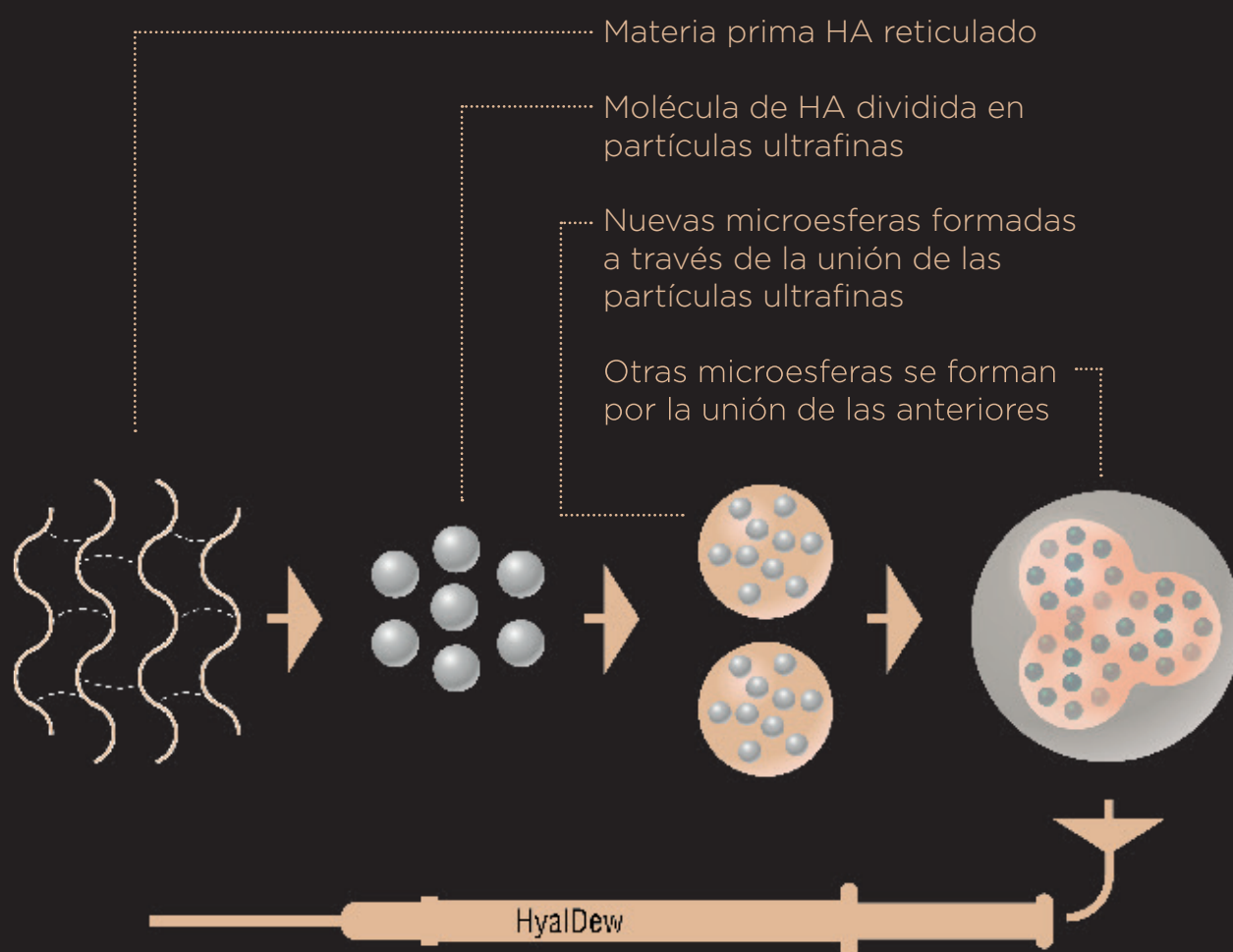

Refractive absorbance


● *Raw material* ● *HyalDew*

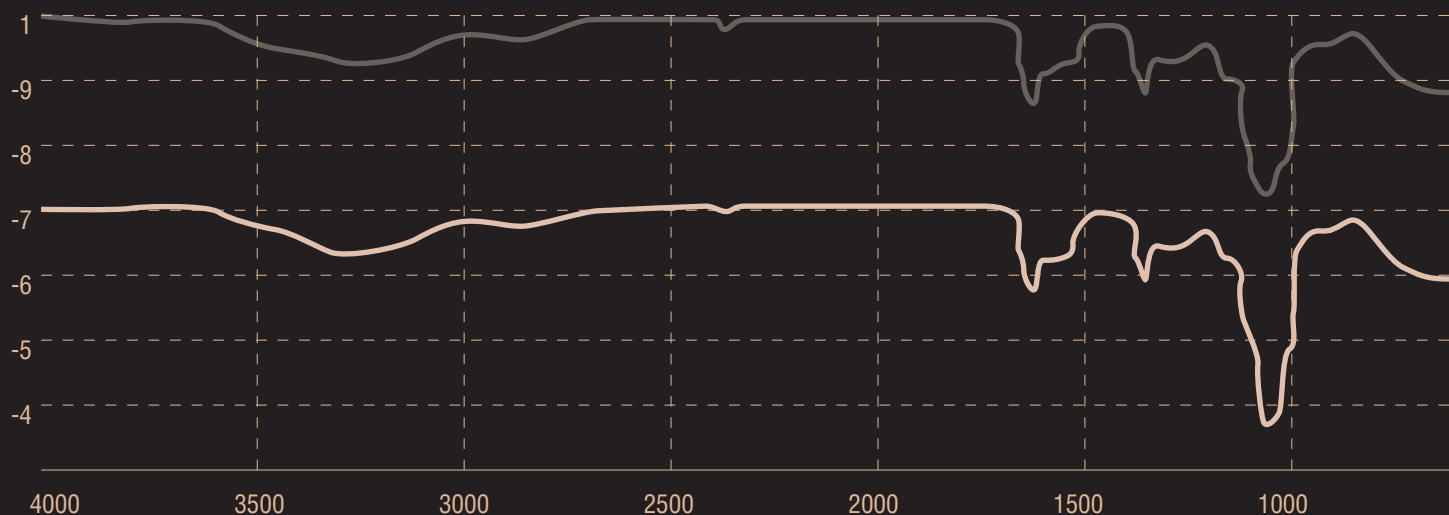

HyalDew consigue un producto final que no pierde propiedades físicas ni modifica químicamente la materia prima inicial gracias a su tecnología.


Su mayor capacidad hidrofílica y su estructura molecular estable hacen que el producto final proporcione un efecto volumen único en comparación con otros implantes dérmicos. Es fácilmente moldeable incluso con cantidades pequeñas de producto.

Test de hialuronidasa

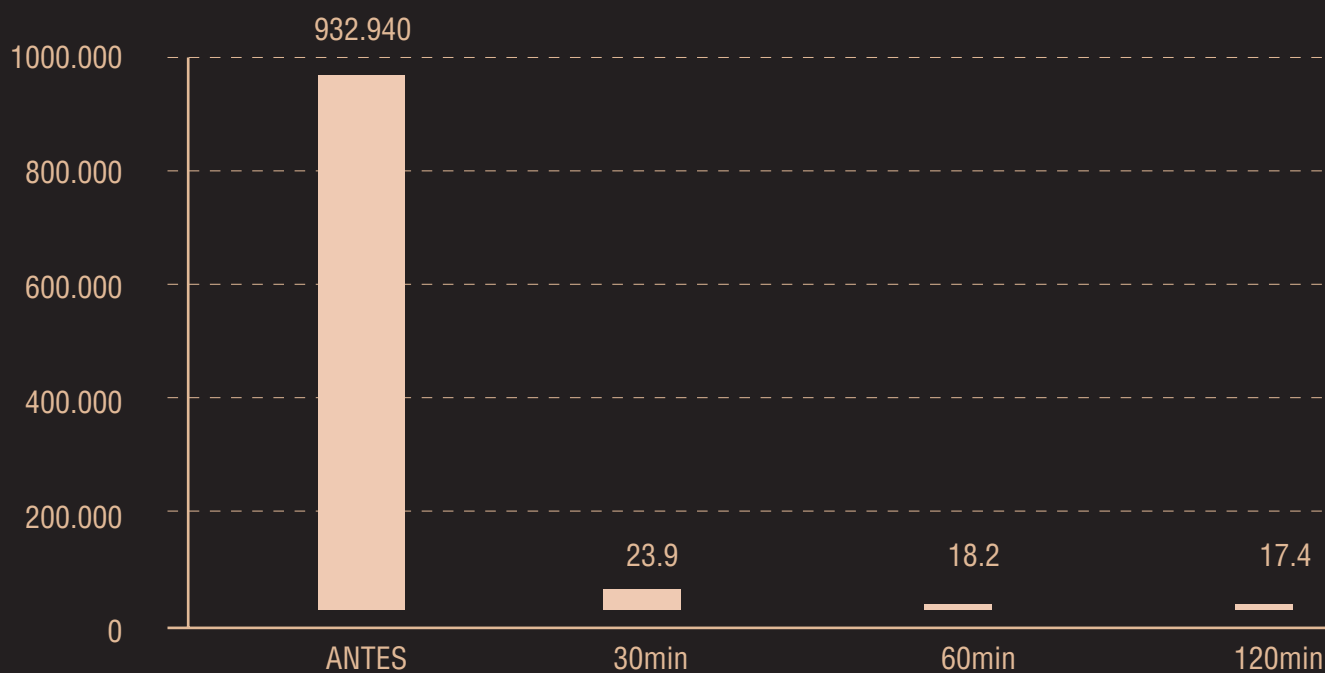

Test de retención de agua

Nuestro producto proporciona un excelente efecto volumen gracias a su elevada capacidad hidrofílica y a su estructura molecular estable en el producto final.

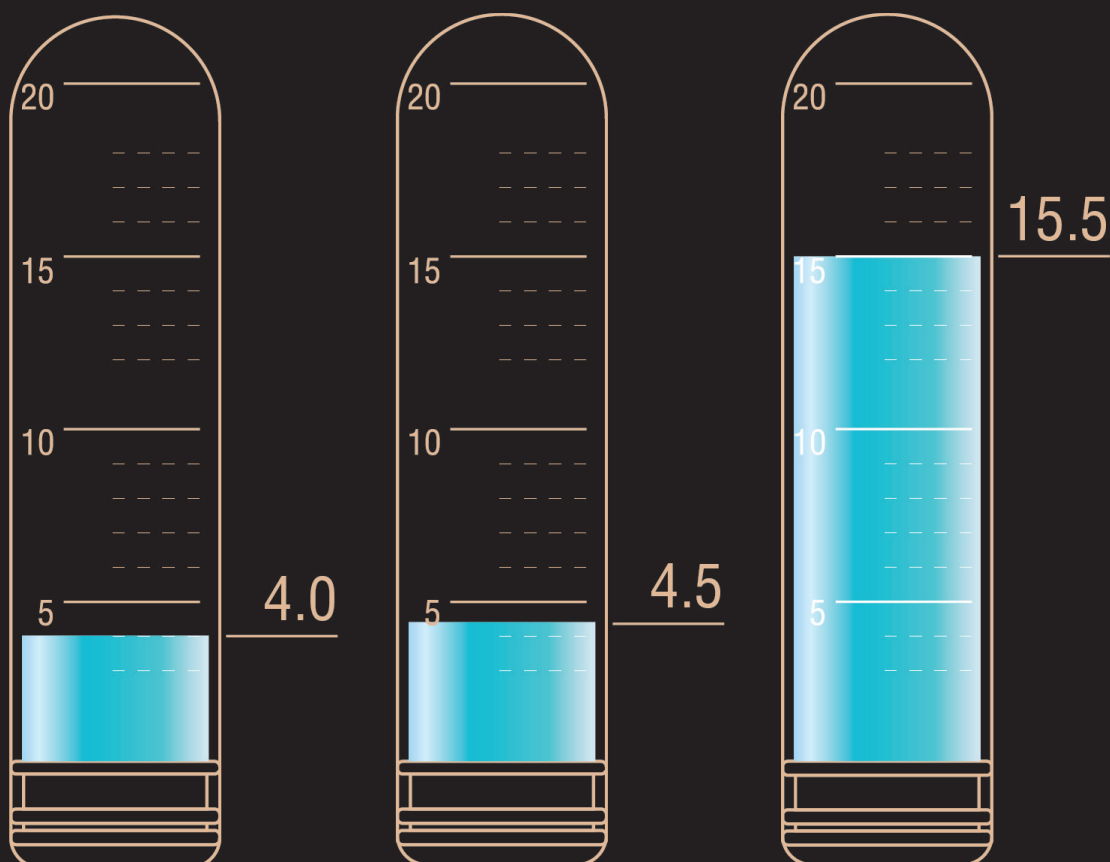

Comparación de la Retención de agua

Centrifugado a 3.000 rpm durante 30 minutos.
(500cc de agua se añaden a una muestra de 1cc)

- Muestra un elevado efecto de volumen comparado con otros productos.
- Excelente efecto voluminizador y fácilmente moldeable incluso en pequeñas cantidades.




HyalDewShine
Reticulación



HyalDewFine
Reticulación



HyalDewMid
Reticulación

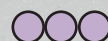

HyalDewAll
Reticulación







SkinPlus
HYAL



5^a Generación

de implantes dérmicos de larga duración de ácido hialurónico (HA)

La elevada cohesividad y viscosidad que presenta el producto final, hace que se moldee fácilmente una vez inyectado.

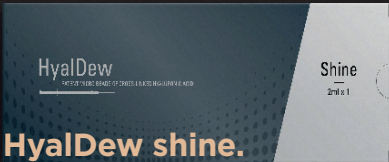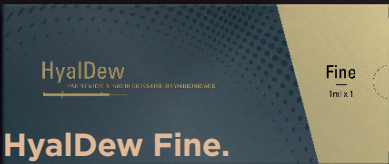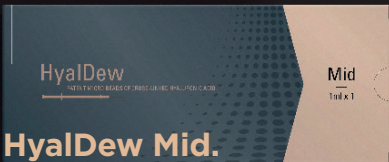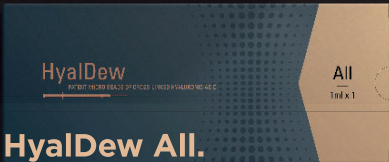	Concentración Ácido Hialurónico	Volumen	Aguja	Tamaño Molécula
 HyalDew shine. Dermis media. Skin booster. Shine contiene HA reticulado puro.	20mg/ml	2ml X 2cc	31G 13mm	50-200 µm
 HyalDew Fine. Dermis media, corrección de arrugas finas.	20mg/ml	1ml X 1cc	30G 13mm	200-300 µm
 HyalDew Mid. Dermis media y profunda.	20mg/ml	1ml X 1cc	27G 13mm	300-400 µm
 HyalDew All. Dermis profunda.	20mg/ml	1ml X 1cc	25G 13mm	400-500 µm
 Skin Plus HYAL Subcutáneo, Supraperiostio	20mg/ml	1ml X 1cc	20G 50mm Cánula 20G 25G 13mm UTW Aguja	800 µm

HyalDew

5^a Generación de implantes dérmicos
ácido hialurónico (HA)

TOVmedical
SMART BEAUTY TECHNOLOGY



WWW.TOVMEDICAL.ES

912 82 52 82

admin@tovmedical.com